


Kurzbedienungsanleitung

Dies ist eine verkürzte Handhabungsanleitung zum SoloStar® 300 Einheiten/ml.

SoloStar® 




Nur mit geeigneten Nadeln verwenden. Fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Ihr medizinisches Fachpersonal, welche Nadeln geeignet sind.

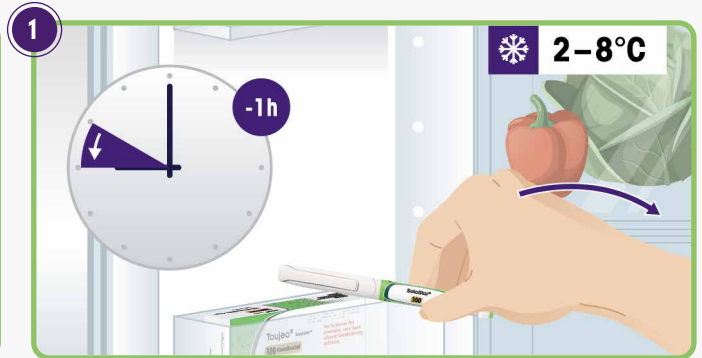

SoloStar® 300 Einheiten/ml eine Stunde vor dem ersten Gebrauch aus dem Kühlschrank nehmen.



Schutzfolie von Nadelkappe entfernen.

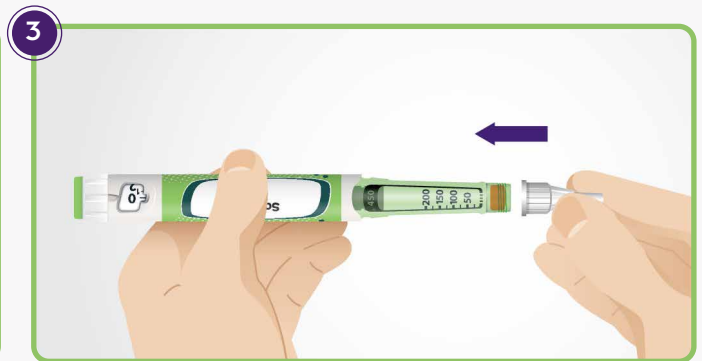

Äußere Nadelkappe gerade halten und auf den Pen setzen.




Nadel auf den Pen schrauben.




Äußere Nadelkappe abziehen und aufbewahren.




Innere Nadelkappe abziehen.

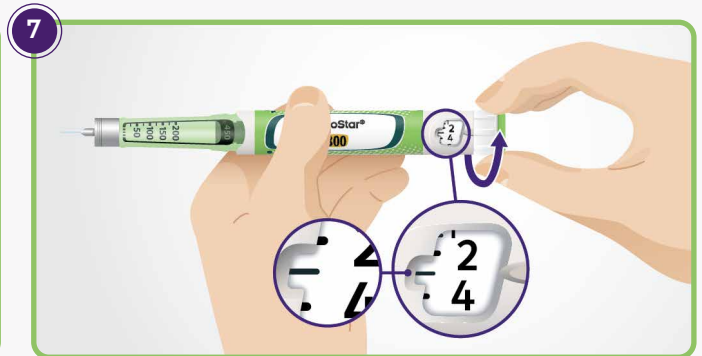


Sicherheitstest durchführen.
Dosierung auf 3 Einheiten stellen.

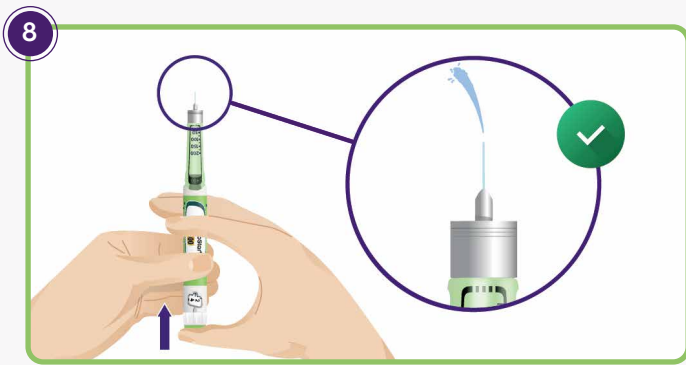


Injektionsknopf drücken, bis Insulin austritt.

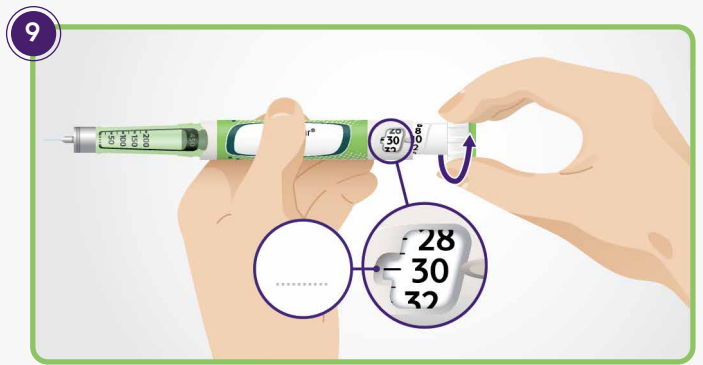


Dosiering drehen, bis gewünschte Dosis angezeigt wird.

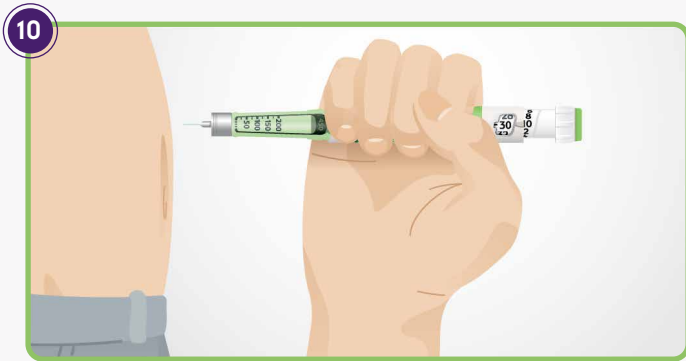

Pen im 90-Grad-Winkel in Haut stechen.

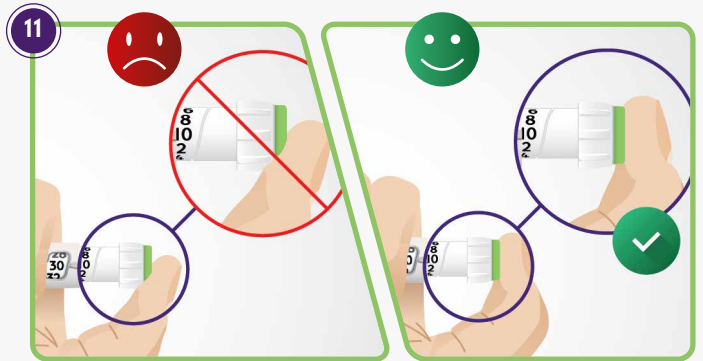


Daumen gerade auf Injektionsknopf legen und dann drücken.

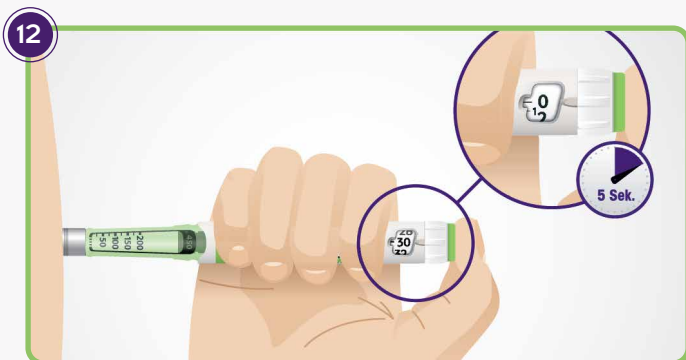

Injektionsknopf gedrückt halten. Wenn „0“ angezeigt wird, langsam bis 5 zählen.



Äußere Nadelkappe auf Nadel setzen.

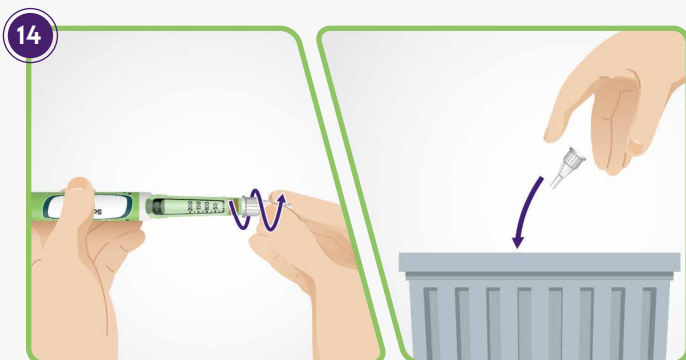

Äußere Nadelkappe abdrehen und sicher entfernen.



SoloStar® 300 Einheiten/ml bei Raumtemperatur (unter 30 Grad) aufbewahren.

Zum Anwendungsfilm:



Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation, die jeder SoloStar® 300 Einheiten/ml-Packung beiliegt.